

Afnamematerialen


Anuschka van Arnhem
maart 2019

Aanvraagformulier Voorkant

blauwe potje

234523

324239

+  **+**

Postbus 9300, 3506 GH Utrecht tel. 030 236 11 36 fax 030 236 11 28 www.saltro.nl saltro@saltro.nl

Urine
 Nuchter
 Wanneer: _____

M.A. Horsman
HA GZC Lunetten
Oeral 1
3524 DS Utrecht
Tel.: 030-2884084

Patiënt: M

Naam _____

Geboortenaam _____

Adres _____ Nr. _____

Postcode/Plaats _____

Verzekeringsgegevens

3543 OPV (ONVZ/PNO/VVA) 9665 IZA (IZA/Tras/Univ/UMC)
3329 Avéro 3317 MENZ (Mensis/Confor/VFZ 3330)
9664 CZGT (CZG/Chal) 7095 VCZ (VCZ/GZ/SZ)
0441 ONVZ 3311 ZZK (ZZK/SZ/GS/CZ)

Andere verzekering, nl. _____

*Nummer verzekering (altijd invullen) _____

Kopie rapport aan _____

Adres _____

Postcode/Plaats _____

Keuring Identiteitsbewijs (altijd invullen)
 ZELF afname door arts Paspoort ZV-pas
 Rijbewijs Werklijst
 ID-kaart Anders _____ *BSN

Uitslag: doorbellen of faxen
Telefoon of faxnummer _____

Deze ruimte vrijhouden voor het laboratorium!

Ter bevestiging van aandoening
 Ter uitsluiting van aandoening
 Screening onduidelijke pathologie
 Controle bekende aandoening
 Verwacht normaal
 Check up
 (Mede) op verzoek patiënt
 Op verzoek specialist
 Altruïstisch donor

In te vullen door medewerker Saltro

Te weinig materiaal afgenomen
 Afname verlep moeizaam
 Geen Urine ingeleverd
 Capillaire afname (vinger-/hielprk)
 Urine gestabiliseerd
 Urine niet gestabiliseerd

AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE MICROBIOLOGIE

02-01-2019

Klinische gegevens

(Voor gericht onderzoek en juiste interpretatie van de uitslag zijn de klinische gegevens van essentieel belang)

Afnamedatum: _____

Afnametijd: _____

Ie ziekte dag: _____

Antibiotica

Na kweekafname gestart met: _____

Laatste 24 uur: _____

Laatste week: _____

Recent buitenlandverblijf ja nee

Waar: _____

Wanneer: _____

tot _____

Ziekhuisbezoek ja nee

Zwanger ja nee Aantal weken: _____

Afweertoonis, te weten _____

Bekend MRSA/BRMO dragerschap _____

Klinische gegevens/indicatie _____

Onderzoek gemarkeerd met (K) wordt uitbesteed en valt buiten de accreditatie van Saltro (M037).

Waar kan ik terecht?

Voor bloedafname kunt u zonder afspraak op een van onze locaties terecht. Kijk op www.saltro.nl/locaties voor de openingstijden of bel naar 030 236 11 36.

Wat neem ik mee?

- Paspoort, rijbewijs of ID-kaart
- Zorgverzekeringpas
- Dit aanvraagformulier

Als zorgaanbieder zijn wij wettelijk verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te noteren. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Zonder legitimatie kunnen wij u niet helpen.

Met dit aanvraagformulier geeft u toestemming voor het diagnostisch onderzoek en voor het registreren van uw gegevens bij Saltro. Het privacyreglement van Saltro vindt u op de website, www.saltro.nl

Voor een onderzoek bij kinderen < 16 jaar is de toestemming van de verantwoordelijke ouder/verzorger nodig.

Naam: _____

Handtekening: _____

Snel geholpen worden?

Vul dan, indien dit nog niet gedaan is door uw (huis)arts, de verplichte velden op het aanvraagformulier in (zie *).

Kosten

De onderzoeken uit de basisverzekering gaan ten koste van uw verplichte eigen risico. Neem contact op met uw zorgverzekeraar over de polisvoorwaarden.

Voor meer informatie: www.saltro.nl/levens

Wat gebeurt er met mijn bloed na het onderzoek?

Saltro voert anoniem/gecodeerd wetenschappelijk onderzoek uit en doet ook onderzoek voor kwaliteitsdoelinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lichaamsmateriaal (testmateriaal, zoals bloed) van patiënten die bij Saltro een onderzoek hebben ondergaan. Wanneer u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw materiaal, kunt u dit kenbaar maken via email aan bezwaa@saltro.nl. U vermeldt uw naam, initialen en geboortedatum. Indien u aanvullende vragen heeft kunt u contact opnemen met Saltro via 030-2361136.



MB201810

MB201810



324239

Urine

- Kweek bacterieel**
- Dipslide A
 - Urine, midstroom B
 - Urine, verblijfsatheter B
 - Urine, éénmalige catheterisatie B
 - Urine, overig, herkomst: B

Maag-darm

- Clostridium difficile D
- Helicobacter pylori onderzoek D
- Bacteriële gastro-enteritis (Campylobacter, Salmonella, Shigella/Enteroinvasieve E. coli, Yersinia, Plesiomonas) D/K
- STEC/EHEC onderzoek (Indien bloederige ontlasting, wordt dit onderzoek standaard toegevoegd) D
- Parasitair PCR pakket 1 (Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Giardia lamblia) D/K
- Parasitair PCR pakket 2 (Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis, Blastocystis hominis) D/K
- Wormeleren microscopie s.v.p. klinische gegevens (buitenland) invullen D
- Wormdeterminatie, s.v.p. klinische gegevens (buitenland) invullen D
- Enterobius vermicularis (glapbandpreparaat) F
- Triple Faeces Test (TFT), alleen na overleg met arts-microbioloog E

Virale gastro-enteritis verwekker onbekend:

- Rota, Adeno, Noro pakket D

Virale gastro-enteritis verwekker uitbraak bekend:

- Noro D
- Rota/Adeno D

Genitaal

- Nugent preparaat (bacteriële vaginose) J
- Actinomyces G

Kweek groep B streptokokken bij zwangeren

- Rectovaginaal G

Kweek bacterieel (zonder gisten)

- Vagina G
- Cervix G
- Fluor G
- Vulva/labia G
- Penis G
- Urethra G
- Semenkweek O
- Genitaal, overig, herkomst: G

Kweek gisten

- Vagina G
- Cervix C
- Fluor C
- Penis C
- Urethra C
- Genitaal, overig, herkomst: G

SOA

(Indien meerdere onderzoeken uit urine gewenst, per onderzoek apart afnamemateriaal afnemen. Let op: dit geldt niet voor een combi aanvraag Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoea)

- Chlamydia trachomatis PCR**
- Urine C
 - Vaginaal I
 - Cervix I
 - Anaal (indien positief volgt LGV serotyping) I/K
 - Keel I
 - Oog I

- Neisseria gonorrhoea PCR**
- Urine C
 - Vaginaal I
 - Cervix I
 - Anaal I
 - Keel I
 - Oog I

- Herpes simplex virus PCR**
- Genitaal H
 - Oraal H
 - Overig, herkomst: H

- Trichomonas vaginalis onderzoek**
- urine (mannen) K/C
 - eSwab (vrouwen) G

Overig

- Mycoplasma genitalium PCR H/K
- Treponema pallidum PCR (ultstrijk ulcus) H/K

Luchtwegen

- Kweek bacterieel**
- Keel G
 - Neus G
 - Sputum P
 - Overig, herkomst: G

PCR

- Influenza PCR H
- Bordetella PCR K/N
- Chlamydia pneumoniae PCR PH/K
- Chlamydia psittaci PCR PH/K
- Mycoplasma pneumoniae PCR H/K
- RS virus H
- Overig, herkomst: H

Overig

- Legionella sneltest B/C

TBC/ Mycobacterium

- TB kweek K/P
- TB PCR K/P
- IGRA (Quantiferon) K/L
- Overige materialen en non-TB. Alleen na overleg met arts-microbioloog over ziektebeeld en diagnostiek

Bijzonder Resistente Micro-Organismen

Voor het optimaal uitvoeren van de kweek, bij bekend dragerschap de gezochte stam op voorzijde formulier invullen.

- MRSA**
- Keel G
 - Neus G
 - Perineum G
 - Wond, herkomst: G
 - Overig, herkomst: G

- MRSA (personeel)**
- Keel G
 - Neus G

- BRMO/ESBL**
- Rectum G
 - Feces D

- VRE**
- Feces/Rectum K/D/G

Gist/schimmel

- Haar P
- Huid G/P
- Nagel P
- Oor G
- Schilfers P
- Overig, herkomst: P

Materiaal/gevraagd onderzoek niet op formulier

Overig

- Kweek bacterieel**
- Huid G
 - Oog G
 - Oor, otitis media G
 - Oor, otitis externa G
 - Punctaat, herkomst: G/P

- Pus, herkomst: G
- Wond, herkomst: G
- Overig, herkomst: G

- Herpes simplex virus PCR H
- Varicella zoster PCR H/K

- Bof PCR (urine/swab wang) H/K
- Mazelen PCR (urine/swab keel) H/K
- Enterovirusen PCR H/K

Malaria en overige bloedparasieten

- Altijd cito aanmelden via 030-2361125**
- Malaria M
 - Land: M
 - Verblijfsduur: P
 - Terugkomst: G/P
 - Malariaprofylaxe: P
- Mobiel nummer aanvrager (anders wordt aanvraag niet in behandeling genomen): 06-

Infectieserologie

Aanmelden via algemeen aanvraagformulier/probleem georiënteerd aanvraagformulier

Afnamematerialen

- Dipslide A
- Urinebus geel/zwart B
- Urinebus wit/zwart C
- Feces in steriele container D
- TFT afnameset E
- Plakbandpreparaat (eSwab) voor kweek F
- Swab in UTM voor PCR G
- Swab in Cobas medium voor PCR H
- Gedroogd preparaat I
- Uitbesteed onderzoek J
- Quantiferon afnameset K
- EDTA bloed L
- Nasofarynxwat voor PCR M
- Semen container N
- Steriele container O
- P



VAKJES OP DE JUISTE MANIER AANKRUIZEN: = goed = fout = fout

Aanvraagformulier
Achterkant

AANVRAAGFORMULIER

- Volledig invullen.....Incl. BSN, dat is leidend
- Noteren van naam en geb.datum op het materiaal
- AB gebruik
- Klinische gegevens


E-swab met **roze** dop

- Te gebruiken voor o.a
keel/neus/oor/wond/huid/cervix/fluor/urethra/Trichomonas
- **MRSA** : 3 swabs (keel/neus/perineum)
- **BRMO/ESBL**: 1 swab (rectum)
- Stokje afbreken en swab in potje laten zitten
- Bewaarconditie: Maximaal 3 dagen bij kamertemperatuur



Flexibele swab met blauw dopje

- Speciaal voor **PCR kinkhoest**

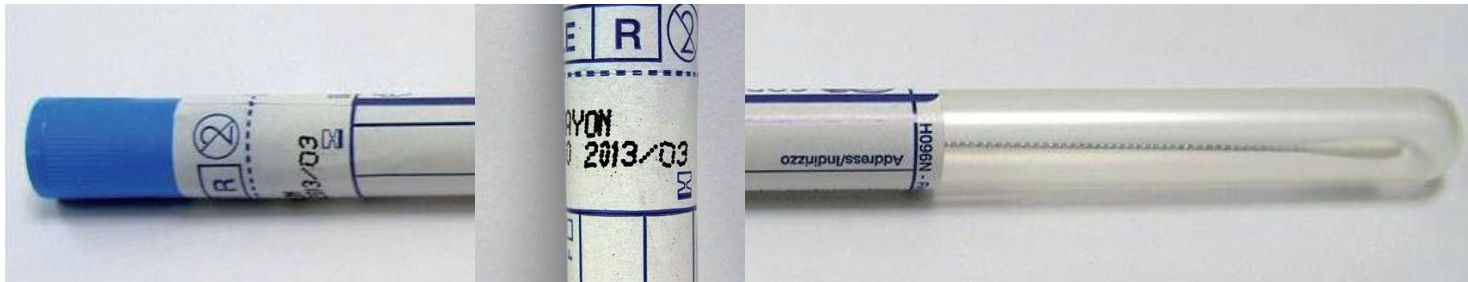

- Flexibel om goed via neus naar keel te kunnen afnemen
- Afnemen bij ziekte duur <3 wkn
- Bij leeftijd <1 jaar ongeacht ziekte duur
- Bewaar conditie: Maximaal 3 dagen bij kamertemperatuur

Urine afnameset

- 3 buisjes
- **Zwart/witte dop:** voor PCR chlamydia/gonorroe, mycoplasma, ureaplasma, bof, mazelen, legionella en testen klinische chemie
- **Geel/zwarte dop:** voor urine kweek
- **Geel/rode dop:** voor urinesediment en urine onderzoek klinische chemie

Vul altijd de 3 buisjes;

Het grote potje weggooien, niet meesturen!

Bewaar conditie: Maximaal 3 dagen in de koelkast



Dipslide

Wordt gebruikt als urine pas na 24 uur op lab kan zijn

Werkwijze:

Uricult in urine dopen, uit laten lekken op een tissue en uricult in buisje doen

Let op: geen urine in buisje dipslide achter laten!

Bewaarconditie:

Maximaal 3 dagen bij kamertemperatuur



Swab in UTM voor PCR, met **rode** dop

- Bof
- Influenza
- Herpes simplex
- Mazelen
- Ureaplasma
- VZV
- HPV



- Bewaarconditie: Maximaal 3 dagen bij kamertemperatuur

Swab in cobas medium voor PCR, met gele dop

- Voor **vagina/cervix/keel/oog/anus** uitstrijken
- 2 swabs in verpakking, eentje is voor verwijderen van slijm, deze na gebruik weggooien, niet in het buisje achter laten
- Met andere swab monster afnemen

Swab in vloeistof laten zitten en afbreken bij de afbreekstrip

Gebruik bij mannen urine afnameset

Bewaarcondities:

- Cobas: 3 dagen bij kamertemp.
- Urine: 3 dagen in koelkast



Universeelcontainer met witte deksel

- Sputum (Max. 2 dagen in de koelkast)
- Schimmelonderzoek: nagels, haren, huidschilfers (Maximaal 3 dagen bij kamertemperatuur)
- Wormen
- Ectoparasieten (bv mijt, teek e.d)



Groot potje met **blauwe** of **rode** deksel

Voor semen:

- Analyse; zsm inleveren op lab (binnen 1 uur)

Let op: speciale aanvraag via Saltro

- Kweek; dezelfde dag inleveren

Bewaarconditie: bij kamertemperatuur



3 Potjes met **bruine** deksel

=TFT afname set

- Te gebruiken bij tropenbezoek of als klachten aanhouden en feces PCR was negatief.
- 3 dagen achter elkaar afnemen
- Niet de vloeistof eruit gieten!
- Vullen tot aan de rode rand



Bewaarconditie: Maximaal 3 dagen in de koelkast

Potje met **blauwe** deksel en schepje

Voor PCR faeces bacterien

- Salmonella / Shigella / EIEC / Yersinia / Campylobacter / Pleisiomonas

Voor PCR feces parasieten

- Entamoeba histolytica / Cryptosporidium / Giardia lamblia (Pakket 1)
- Entamoeba histolytica / cryptosporidium/Giardia lamblia/
Dientamoeba fragilis / Blastocystis hominis (Pakket 2)

Wormeieren

Overige testen:

- Helicobacter / Rota+Adenovirus / Clostridium difficile

PCR

- Noro

Speciale aanvraag *gist* alleen in overleg met de AM

Bewaarconditie: Maximaal 3 dagen in de koelkast



Quantiferon

Let op: speciale aanvraag uitsluitend via Arts microbioloog

- Buisjes vullen, **10x zwenken** van dop boven naar beneden zodat gehele binnenwand van buisje bedekt wordt met bloed. Let op: te krachtig schudden kan leiden tot afwijkende resultaten
- Bloed moet voor 12.00 op Saltro aanwezig zijn
- Afname-instructie zit in het doosje
- Voorzie alle buisjes met een etiket




Gedroogd preparaat

- Plakband preparaat:
- Enterobius vermicularis



- Nugent preparaat

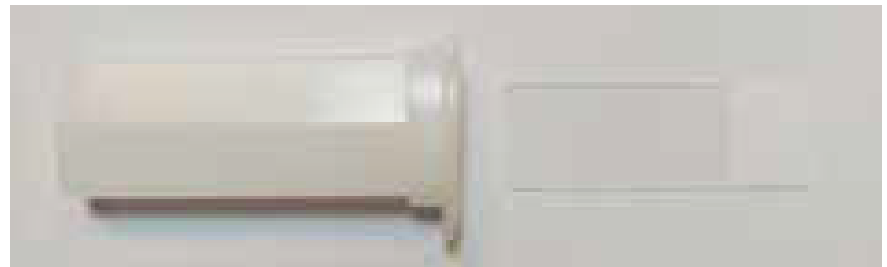

Bewaarcondities: maximaal 3 dagen bij kamertemperatuur

Telefoonnummers

Uitslagen/informatie:

Klinische chemie

T 030 236 11 25
van 08:00 tot 17:00

Microbiologie/Pathologie

T 030 236 11 55
van 08:00 tot 16:30

Intercollegiaal overleg:

klinisch chemici: T 030 236 11 00 (optie 2)

dr. ir. M.B. Kok
drs. T.L. Njo, arts

artsen-microbioloog: T 030 236 11 00 (optie 1)

dr. E.A. Reuland
drs. A.J. Stam
dr. A van 't Veen

Puntjes om extra aandacht aan te besteden

- **Roze** swab is eSwab, ter vervanging van stuart
- **Rode** swab is UTM, voor virussen, geen chlamydia
- Geen losse potjes urine insturen altijd set met 3 buisjes
- Goed aanvraagformulier lezen (priksters) en checken of al het materiaal wat aangevinkt is ook in het zakje zit
- Cobas swab (**geel**) is alleen voor PCR chlamydia/gonococ

A large, irregular orange cloud shape with a thin black outline and a subtle grey drop shadow, centered on a white background. The word "Vragen?" is written in the center of the cloud.

Vragen?